

  
FreeStyle  
Libre 3



## LibreView<sup>3</sup> mit der FreeStyle Libre 3 App<sup>4</sup>

**Teilen<sup>1,2</sup> Sie Ihre Glukosewerte automatisch  
über die FreeStyle Libre 3 App**

1. Tippen Sie auf „Menü“  
und gehen Sie auf „Verbundene Apps“.
2. Wählen Sie „LibreView“ aus und  
tippen Sie auf „Mit einer Praxis verbinden“.
3. Geben Sie die **Praxis-ID\*** ein und  
tippen Sie danach auf „Weiter“.
4. Prüfen Sie die Informationen und  
wählen Sie „Verbinden“.
5. Tippen Sie auf „Fertig“.



**Geschafft, die Verbindung  
zur Praxis besteht!**