



LibreView mit dem FreeStyle Libre 3 Lesegerät

Teilen Sie Ihre Glukosewerte manuell aus dem
Lesegerät mit Hilfe Ihres LibreView-Kontos

1. Registrieren Sie sich kostenlos unter www.libreview.com, um ein LibreView-Konto anzulegen.
2. Installieren Sie von der Webseite einmalig den LibreView Gerätetreiber.
3. Schließen Sie ihr Lesegerät über das mitgelieferte Kabel an Ihren Computer an.
4. Laden Sie Ihre Glukose-Berichte über die Schaltfläche „**Hier drücken, um Patientendaten hochzuladen**“ hoch.
5. Klicken Sie im Einstellungsmenü auf „**Kontoeinstellungen**“ → „**Meine Praxen**“
→ geben Sie die **Praxis-ID*** ein
→ und klicken Sie auf „**Hinzufügen**“.



**Geschafft, die Verbindung
zur Praxis besteht!**